

LÜSOTOFF[®]
THINKING ABOUT FUTURE

MANUAL DE USUARIO

CAMILLA DE MASAJES PLEGABLE

CAML250-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

1. INTRODUCCIÓN

La camilla CAML250-8 es ideal para profesionales, es ligera y se puede trasladar para su uso. Este modelo es muy versátil, cómodo además de ser confortable para el paciente, de este modo se logra mayor relajación y disfrutar aún más la sesión.

Trae accesorios como los reposadores de brazos y cabeza, con el fin de sostener de manera adecuada las extremidades, otorgando mayor bienestar durante su uso y asegurando la posición correcta y protección a la salud del paciente.


Su diseño ergonómico permite adecuarse a diversas practicas profesionales como; Reiki, Fisioterapia, masajes, stretching, entre otros.

Al ser plegable, es de fácil armado y guardado, también es sencillo poder regular su altura. Así es posible lograr una adecuación exacta a cada paciente. Además, ocupa muy poco espacio y cuenta con una bolsa para su fácil traslado permitiendo ejercer la actividad en cualquier lugar.

2. INSTRUCCIONES DE USO

1. Mantener ajustada la camilla. Asegurarse de que todos los tornillos y cables se encuentren en buenas condiciones y que no dañen la estructura de madera.
2. Se recomienda no sobre cargar el peso de la camilla y utilizar los límites recomendados. De lo contrario podría resultar seriamente lesionado. El pedido máximo de soporte es de 250 kg.
3. No debe usarse limpiadores a base de alcohol sobre la colchoneta, esto puede producir danos en el material. Es recomendable usar agua tibia con jabón neutro y una rejilla seca.
4. Cuando esté uso, las 4 patas de la camilla deben estar niveladas para tener estabilidad. De lo contrario puede provocar lesiones durante su uso.
5. No esta permitió el armado o desarme de la camilla a niños.
6. Se debe tener cuidados al manipular objetos filosos sobre la camilla, estos la pueden rasgar. Mantener la camilla lejos de elementos filosos.

3. PARTES DE LA CAMILLA

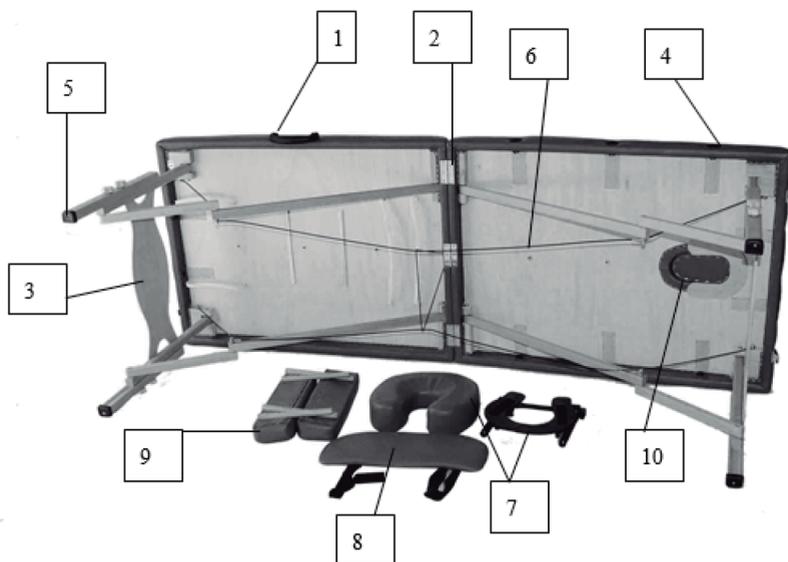

1. Manija
2. Bisagras
3. Placa de cabecera y pies
4. Enganche para apoya brazo
5. Base de goma antideslizante
6. Guías de estructura
7. Reposador de cabeza
8. Reposador de brazo frontal
9. Par de reposadores de brazos laterales

4. PASO A PASO PARA EL ARMADO



1. Quitar el pasador sujetador.
2. Extender la camilla en el suelo, la mesa debe quedar de lado, con cuatro pies de goma en el suelo, abra la mesa con las cuatro patas extendidas al máximo.
3. Retire los accesorios de la parte inferior de la camilla.
4. Levante la camilla hasta que todas las patas se encuentren tocando el piso.
5. Coloque los accesorios: Soportes de brazos en sus correctas ubicaciones (frontal y lateral).
6. Coloque el apoyo para cabezas y ajuste.
7. La camilla está lista para usar.

Nota: La altura de la camilla es ajustable tocando la perilla que se encuentran en todos los sostenes. Se los presiona, y se puede mover hacia arriba o hacia abajo para acomodar la altura. Esto se repite en los 4 sostenes, al finalizar se deben ajustar las perillas nuevamente.

5• EMPAQUE Y TRANSPORTE



Para poder guardar la camilla y transportarla se deben hacer los siguientes pasos. Una vez finalizado el uso:

1. Quitar todos los accesorios (reposador de cabeza, reposador de brazos etc).
2. Tomar por el respaldo (zona donde se apoya la cabeza) y doblar hacia el medio. Con el sujetador ubicado en uno de los lados, se debe ajustar o trabar.

3. Guarde los accesorios debajo del respaldo principal, sostenidos por los soportes (cuerda elástica).
4. Doblar cada una de las patas o soportes hacia el interior presionando los brazos de soporte correspondientes.
5. Ponerla dentro de la bolsa.
6. Se puede transportar fácilmente.

Atención: Si la estructura, patas o la parte superior (mesa) es dañada, se recomienda no usar porque puede causar lesiones serias a usted y/o su paciente. Esto debe ser reparado de manera inmediata.

4. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD
LUSQTOFF**

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR